

Element RC Update Anleitung

Ein leerer USB-Stick ist erforderlich.

1. Laden Sie das Softwareupdate 1.00.01.44 herunter.
2. Erstellen Sie einen **neuen Ordner mit den Namen „upgradepackage“ auf dem USB Stick.**
3. **Speichern Sie die heruntergeladene ZIP-Datei „SD1_1.00.01.44_08“ in dem Ordner „upgradepackage“**
4. Schalten Sie das Instrument aus.
5. Stecken Sie den USB-Stick in den unteren USB-Anschluss des Element RC.
6. Schalten Sie das Instrument ein.
7. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und bestätigen Sie mit OK.
8. Schalten Sie das Element RC aus, nachdem das Update installiert wurde und die Meldung auf dem Bildschirm angezeigt wird.
9. Entfernen Sie den USB-Stick.
10. Schalten Sie das Gerät ein: Die Aktualisierung ist abgeschlossen.
11. Überprüfen Sie die Update-Version auf dem Hauptbildschirm des Geräts.